



L'INNOVAZIONE DIGITALE IN TELEMEDICINA

TDS

rev. 01/06/2019

TELEMEDICINE DIGITAL STATION



Le immagini gentilmente concesse da Nese point e le feature dei servizi offerti da Cardio On Line Europe possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

UNICA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA



TDS
TELEMEDICINE
DIGITAL STATION

Gentile Cliente,

[Cardio On Line Europe](#), società [certificata](#) a livello nazionale ed internazionale nello specifico campo di applicazione, da 23 anni propone soluzioni di telemedicina nel rispetto delle norme europee (GDPR) che impongono rigidi inquadramenti aziendali in termini di obiettivi e controlli.

I servizi di telemedicina vengono erogati sulla base di modelli organizzativi che portano a risultati dall'alto standard qualitativo e tutti gli esami vengono refertati esclusivamente da cardiologi fisicamente presenti nelle Centrali Operative 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Per soddisfare le esigenze degli Operatori Sanitari, Cardio On Line Europe ha creato la **TELEMEDICINE DIGITAL STATION**, una postazione multidisciplinare completamente digitale che impiega apparecchiature top di gamma per la gestione evoluta e performante dei servizi di telemedicina. Con la **TDS**, sarà possibile erogare in completa autonomia servizi ad alto valore aggiunto quali elettrocardiogrammi, Holter cardiaci e Holter pressori.

Alcune peculiarità dei servizi offerti:

- TELECARDIOLOGIA > servizio di refertazione ECG in tempo reale con consulenza cardiologica < 24 ore su 24, 365 giorni l'anno (l'elettrocardiografo è indicato anche per uso pediatrico);
- HOLTER CARDIACO > 2 tipologie di *devices*, a 3 e 12 derivazioni, per offrire ai propri clienti qualsiasi tipo di richiesta specialistica con referto garantito entro 24/48 ore;
- HOLTER PRESSORIO > referto garantito entro 45 minuti dalla ricezione dell'esame in piattaforma, dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni dell'anno, festivi e superfestivi compresi.

I risultati vengono poi condivisi con gli Operatori tramite la WebApp, **una piattaforma digitale web based certificata dal Ministero della Salute come dispositivo medico di classe IIa** (*devices* e referti esemplificativi alle pagine seguenti).

Le proposte, fruibili in diverse soluzioni, sono fiscalmente incentivate nel 2019 con il superammortamento al 130% (rif. Decreto Crescita Italia del 02/04/2019, art.1) e con il credito di imposta del 45% per gli investimenti nel Mezzogiorno destinato alle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (rif. circolare Agenzia delle Entrate n°12 E del 13/05/2017).

Rimanendo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Claudio Lopriore

CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.

sede Via Principe Amedeo, 25 - 70121 Bari (BA)
tel. 080 5613578 | Cap. Soc. 100.000,00 € i.v.
Part. IVA n. 04871010726 | C.C.I.A.A. Bari n. 290463/96
mail info@cardioonlineeurope.com
pec cardioonlineeurope@pec.it



AZIENDA ASSOCIATA



AZIENDA CERTIFICATA





TouchECG HD+

rev. 01/08/2019

elettrocardiografo a 12 derivazioni standard
by CARDIOLINE

SPECIFICHE TECNICHE

- MODULO DI ACQUISIZIONE HD+**
- DERIVAZIONI ECG** 12 DERIVAZIONI STANDARD (I, II, III, AVR-L-F, V1-6)
- FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO** 1000 CAMPIONI/SECONDO/CANALE
- CONVERTITORE A/D** 24 bit/32000 HERTZ/CANALE
- PROTEZIONE DA DEFIBRILLATORE** STANDARD AAMI/IEC
- RICONOSCIMENTO PACEMAKER** CORRELATO HARDWARE E SOFTWARE CON FILTRO DIGITALE
- RICONOSCIMENTO ELETTRODO STACCATO** INDIPENDENTE SU TUTTI GLI ELETTRODI
- TRASFERIMENTO DATI WIRELESS** BLUETOOTH 2.0 CON "SECURE PAIRING"
- CAVO PAZIENTE** SINGOLO CONNETTORE, 10 ELETTRODI, SOSTITUIBILE
- TASTO** 1 TASTO PROGRAMMABILE (UTENTE/PROGRAMMA)
- ALIMENTAZIONE** 2 BATTERIE STANDARD TIPO AAA 1,5 V
- AUTONOMIA** > 500 ECG
- DIMENSIONI&PESO** 115x65x15 MM, < 90 G (BATTERIE INCLUSE)
- PROTEZIONE AMBIENTALE** IP42 (CON GUSCIO PROTETTIVO)
- PROTEZIONE URTI** RESISTENTE A CADUTE DA 1 M DI ALTEZZA SU CIASCUN LATO, ANGOLO O SUPERFICIE (CON GUSCIO PROTETTIVO)

DESCRIZIONE

TOUCHECG È UN ELETTROCARDIOGRAFO DI TIPO OSPEDALIERO E AMBULATORIALE A 12 DERIVAZIONI DI NUOVA CONCEZIONE, CHE SI AVVALE DI UN CAVO PAZIENTE WIRELESS DI FACILE IMPIEGO. L'INTERFACCIA INTUITIVA RENDE TOUCHECG UN ELETTROCARDIOGRAFO DI FACILE E IMMEDIATO UTILIZZO, PRATICO SIA PER IL PAZIENTE SIA PER L'UTENTE E IN GRADO DI ASSICURARE TRACCIATI DI ALTA QUALITÀ. LA PORTABILITÀ, FAVORITA ANCHE DALLA CUSTODIA IN DOTAZIONE, RENDE TOUCHECG LO STRUMENTO IDEALE PER CLINICHE, FARMACIE E STUDI MEDICI. DOTATO DI TECNOLOGIA DI NUOVA GENERAZIONE, HD+ ACQUISISCE TRACCIATI ECG DIAGNOSTICI A 12 DERIVAZIONI SODDISFANDO SE NON ADDIRITTURA SUPERANDO LE PIÙ RIGOROSE NORME IN MERITO AD APPLICAZIONI CLINICHE E DIAGNOSTICHE (AAMI ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF MEDICAL INSTRUMENTATION, ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, AHA AMERICAN HEART ASSOCIATION, ACC AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY). L'AMPIA CONNETTIVITÀ DI TOUCHECG NE FA IL PRIMO ELETTROCARDIOGRAFO IN GRADO DI COMUNICARE DIRETTAMENTE CON UN ARCHIVIO CLOUD SENZA NECESSITÀ DI CONNESSIONE A UNA RETE DI PC. LA VARIETÀ DI PROTOCOLLI SUPPORTATI INOLTRE, CONSENTE L'INTEGRAZIONE DEGLI ECG IN QUALSIASI FLUSSO DI DATI CLINICI, ARCHIVI O SISTEMI LOCALI DI GESTIONE. TOUCHECG PUÒ ESSERE CONNESSO A UNA PRATICA STAMPANTE WIRELESS A4 PER STAMPARE TRACCIATI IN FORMATI DIVERSI.



PEDIATRICO

IL TOUCHECG HD+ PUO' ESSERE IMPIEGATO SU ADULTI E BAMBINI



PC LINK

TRASMISSIONE DEI DATI DI MISURAZIONE AL PC TRAMITE CONNESSIONE BLUETOOTH



CENTRALE OPERATIVA

ESAMI REFERTATI ESCLUSIVAMENTE DA CARDIOLOGI, ANCHE IN LINGUA INGLESE



CONDIVISIONE DEL REFERTO

SU AREE WEB RISERVATE UNICAMENTE DEDICATE AL CLIENTE



RISULTATI

REFERTI IN TEMPO REALE (ENTRO 15') CON CONSULENZA SPECIALISTICA "ON LINE"

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI A QUESTO DEVICE, SONO OFFERTE UNICAMENTE DA CARDIO ON LINE EUROPE

CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.

sede Via Principe Amedeo, 25 - 70121 Bari (BA)
tel. 080 5613578 | Cap. Soc. 100.000,00 € iv.
Part. IVA n. 04871010726 | C.C.I.A.A. Bari n. 290463/96
mail info@cardioonlineeurope.com
pec cardioonlineeurope@pec.it




AZIENDA ASSOCIATA



AZIENDA CERTIFICATA



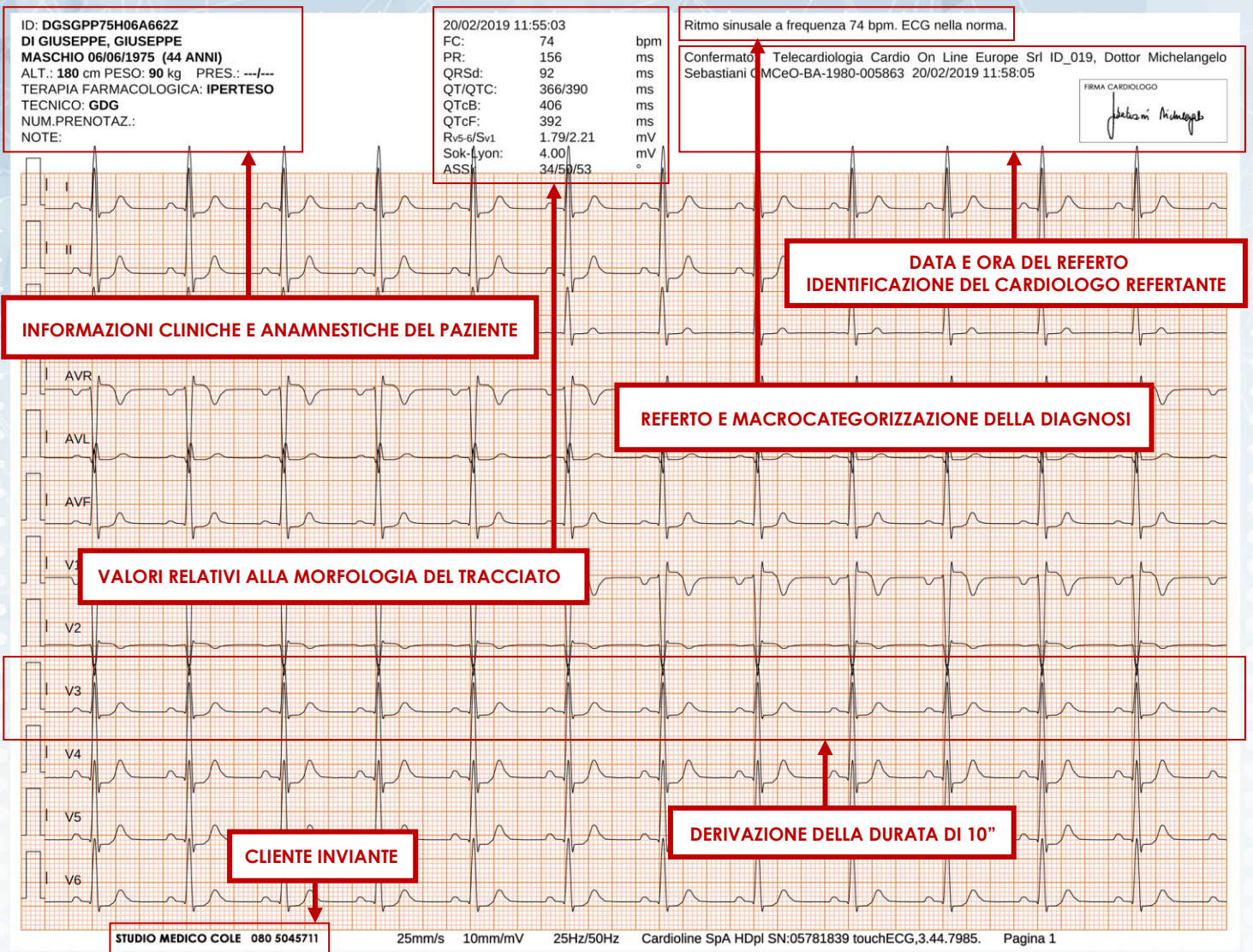

Il paziente ha autorizzato l'invio del referto al sistema di telemedicina (GDPR)

L'elettrocardiogramma refertato include informazioni relative al quadro clinico del paziente, descrizione della morfologia del tracciato, 12 derivazioni standard ognuna della durata di 10 secondi, data e ora di acquisizione, identificazione dello specialista refertante, *strong signature*, macrocategorizzazione del referto ed è valido ai fini medico-legali. Il Cliente dovrà semplicemente stamparlo e consegnarlo al fruitore finale del servizio. Questo documento è da ritenersi prodromico per qualsiasi situazione necessiti di un ECG.



SPECIFICHE TECNICHE

CANALI ECG 3

TIPO DI REGISTRAZIONE ACQUISIZIONE DIGITALE IN CONTINUO

SUPPORTO DI REGISTRAZIONE MEMORIA FLASH INTERNA

DIMENSIONI MEMORIA 64 MBYTE

RILEVAZIONE IMPEDENZA PAZIENTE INDIPENDENTE PER OGNI DERIVAZIONE

RISOLUZIONE 10 BITS; 11 MICROV/BIT LSB | **RISPOSTA DI FREQUENZA** 0.05 – 55 Hz

DINAMICA DC ±300 mV DC SUPERIMPOSIZIONE DEL SEGNALE

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 250 Hz PER CANALE PER 24 ORE O 125 Hz PER CANALE PER 48 ORE

TRASFERIMENTO DATI TRAMITE CAVO USB IN MENO DI 2 MINUTI

VISUALIZZAZIONE ECG IN TEMPO REALE 3 CANALI SU MONITOR DEL PC

ALIMENTAZIONE 1 BATTERIA ALCALINA AA 1.5V

DIMENSIONI&Peso 110x83x17 MM, 149 GR

INDICAZIONI L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE IMPIEGATO PER RILEVARE ECG SU BAMBINI DI PESO INFERIORE

AI 10 KG E PER REGISTRAZIONI DI DURATA MASSIMA PARI A 24h (CAMPIONAMENTO A 250Hz/CANALE)

CLASSE&TIPO (IEC 601-1) CLASSE A.I. (ALIMENTAZIONE INTERNA), TIPO CF

CLASSE (DIRETTIVA 93/42/CEE) IIa

CONDIZIONI DI UTILIZZO TEMPERATURA TRA +10 E +45° C; UMIDITÀ RELATIVA TRA 25% E 95%



DESCRIZIONE

CLICKHOLTER È UN REGISTRATORE ECG HOLTER DI NUOVA GENERAZIONE, CHE PERMETTE DI REGISTRARE, CON QUALSIASI CONFIGURAZIONE DI CAVO PAZIENTE, FINO A 48 ORE, CON FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO FINO A 500 CAMPIONI/SECONDO. VIA SOFTWARE È POSSIBILE SELEZIONARE LA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO CHE IL DISPOSITIVO DEVE UTILIZZARE IN FASE DI REGISTRAZIONE. CLICKHOLTER OFFRE ALL'OPERATORE DI REGISTRARE UN MESSAGGIO VOCALE DI 20s DURANTE LA PREPARAZIONE UTILE PER LA SUCCESSIVA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE. L'INTERFACCIA UTENTE È SEMPLICE ED INTUITIVA. UN DISPLAY TFT DA 2.2" A COLORI PERMETTE DI VISUALIZZARE FINO A 6 TRACCE CONTEMPORANEAMENTE, CONSENTENDO AL MEDICO DI VERIFICARE LA BUONA QUALITÀ DEL SEGNALE PRIMA DI AVVIARE LA REGISTRAZIONE. PESO E DIMENSIONI DEL REGISTRATORE SONO CONTENUTE IN MODO DA RENDERE L'APPARECCHIO COMODO DA INDOSSARE. I DATI REGISTRATI POSSONO ESSERE SCARICATI ED ANALIZZATI MEDIANTE IL SOFTWARE CARDIOLINE CUBEHOLTER OPPURE SCARICATI E TRASMESSI AD UN COMPUTER REMOTO MEDIANTE IL SOFTWARE CARDIOLINE WEBUPLOADER. IL TRASFERIMENTO DEI DATI AVVIENE CON CAVO USB. MEDIANTE WEBUPLOADER È ANCHE POSSIBILE PREPARARE IL REGISTRATORE, TRASFERENDOV I DATI PAZIENTE E LA TIPOLOGIA DI REGISTRAZIONE DA ESEGUIRE. L'ALIMENTAZIONE CON BATTERIA AA STANDARD, GARANTISCE UNA PREPARAZIONE FACILE DEL REGISTRATORE E LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE BATTERIE RICARICABILI PERMETTE DI CONTENERE I COSTI DEL MATERIALE.



PEDIATRICO

IL CLICKHOLTER PUO' ESSERE IMPIEGATO SU ADULTI E BAMBINI DI PESO < 10 KG



PC LINK

TRASMISSIONE DEI DATI DI MISURAZIONE AL PC TRAMITE CONNESSIONE USB



CENTRALE OPERATIVA

ESAMI REFERTATI ESCLUSIVAMENTE DA CARDIOLOGI, ANCHE IN LINGUA INGLESE



CONDIVISIONE DEL REFERTO

SU AREE WEB RISERVATE UNICAMENTE DEDICATE AL CLIENTE



RISULTATI

REFERTI RESTITUITI ENTRO 24, MAX 48 ORE DALLA RICEZIONE IN PIATTAFORMA

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI A QUESTO DEVICE, SONO OFFERTE UNICAMENTE DA CARDIO ON LINE EUROPE

CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.

sede Via Principe Amedeo, 25 - 70121 Bari (BA)
tel. 080 5613578 | Cap. Soc. 100.000,00 € i.v.
Part. IVA n. 04871010726 | C.C.I.A.A. Bari n. 290463/96
mail info@cardionlineeurope.com
pec cardionlineeurope@pec.it



AZIENDA ASSOCIATA



AZIENDA CERTIFICATA



SPECIFICHE TECNICHE

- CANALI CONFIGURABILE** DA 3 A 12 CANALI ACQUISITI SIMULTANEAMENTE E CONTINUAMENTE
- DURATA DELLA REGISTRAZIONE** DA 1 A 7 GIORNI (IN BASE ALLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO)
- FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO** 250, 1000 CAMPIONI AL SECONDO (IN BASE ALLA MODALITÀ)
- RISOLUZIONE** 14; 15 BIT (IN BASE ALLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO)
- DISPLAY** A COLORI PER LA VISUALIZZAZIONE DEL TRACCIATO ECG, DELLA QUALITÀ DEL CONTATTO ELETTRODO/PELLE E DEI MESSAGGI PER LA PREPARAZIONE E LO SCARICO DELL'ESAME
- MEMORIA** 1 GB, INTEGRATA NEL DISPOSITIVO
- LED** 1 LED VERDE PER LO STATO BATTERIE; 1 LED BLU PER LO STATO DELLA MEMORIA
- TASTI** 1 TASTO MULTIFUNZIONE A 5 POSIZIONI
- CAVO PAZIENTE** CAVO 5; 7; 10 FILI CON TERMINAZIONE A BOTTONE
- PROTEZIONE PER DEFIBRILLATORE** ASSENTE
- RICONOSCIMENTO PACEMAKER** RILEVAZIONE HARDWARE SU 3 CANALI
- ALIMENTAZIONE** 1 PILA STANDARD TIPO AA ALCALINA
(ULTRA O RICARICABILE NiMH DA ALMENO 2500MAH)
- DIMENSIONI&PESO** 96x65x20 MM, < 150 G (BATTERIA INCLUSA)
- PROTEZIONE AMBIENTALE** IP30 | **CLASSE (DIRETTIVA 93/42/CEE)** IIa
- INTERFACCIA PC** CHIAVE STANDARD BLUETOOTH SU USB 2.0 HIGH SPEED



DESCRIZIONE

WALK400H È UN REGISTRATORE ECG HOLTER DI NUOVA GENERAZIONE, CHE PERMETTE DI REGISTRARE, CON QUALSIASI CONFIGURAZIONE DI CAVO PAZIENTE, FINO A 48 ORE, CON FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO FINO A 1000 CAMPIONI/SECONDO E FINO A 7 GIORNI, CON FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO A 250 CAMPIONI/SECONDO. È POSSIBILE SCEGLIERE IL NUMERO DI CANALI DA REGISTRARE UTILIZZANDO UN CAVO A 5, 7 O 10 FILI. IL DISPOSITIVO RICONOSCE AUTOMATICAMENTE IL CAVO INSERITO E SELEZIONA CONSEGUENTEMENTE IL TIPO DI REGISTRAZIONE. VIA SOFTWARE È INOLTRE POSSIBILE SELEZIONARE LA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO CHE IL DISPOSITIVO DEVE UTILIZZARE IN FASE DI REGISTRAZIONE. WALK400H È DOTATO DI ACCELEROMETRO E FORNISCE UN'INDICAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL PAZIENTE: CAMMINATA, CORSA, IN PIEDI, FERMO. L'INTERFACCIA UTENTE È SEMPLICE ED INTUITIVA. UN DISPLAY TFT DA 2.2" A COLORI PERMETTE DI VISUALIZZARE FINO A 6 TRACCE CONTEMPORANEAMENTE, CONSENTENDO ALL'UTENTE DI VERIFICARE LA BUONA QUALITÀ DEL SEGNALE PRIMA DI AVVIARE LA REGISTRAZIONE. PESO E DIMENSIONI DEL REGISTRATORE SONO CONTENUTE IN MODO DA RENDERE L'APPARECCHIO COMODO DA INDOSSARE. I DATI REGISTRATI VENGONO SCARICATI E TRASMESSI AD UN COMPUTER REMOTO MEDIANTE IL SOFTWARE CARDIOLINE WEBUPLOADER. L'ALIMENTAZIONE CON BATTERIA AA STANDARD, GARANTISCE UNA PREPARAZIONE FACILE E LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE BATTERIE RICARICABILI PERMETTE DI CONTENERE I COSTI DEL MATERIALE.



PEDIATRICO

IL WALCK400 PUO' ESSERE IMPIEGATO SU ADULTI E BAMBINI DI PESO < 10 KG



ACQUISIZIONE

24/48H PER 12 DERIVAZIONI, 1 SETTIMANA PER 3 DERIVAZIONI



CENTRALE OPERATIVA

ESAMI REFERTATI ESCLUSIVAMENTE DA CARDIOLOGI, ANCHE IN LINGUA INGLESE



CONDIVISIONE DEL REFERTO

SU AREE WEB RISERVATE UNICAMENTE DEDICATE AL CLIENTE



RISULTATI

REFERTI RESTITUITI ENTRO 24, MAX 48 ORE DALLA RICEZIONE IN PIATTAFORMA

3,12 LEADS

24/48H

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI A QUESTO DEVICE, SONO OFFERTE UNICAMENTE DA CARDIO ON LINE EUROPE

CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.

sede Via Principe Amedeo, 25 - 70121 Bari (BA)
tel. 080 5613578 | Cap. Soc. 100.000,00 € i.v.
Part. IVA n. 04871010726 | C.C.I.A.A. Bari n. 290463/96
mail info@cardionlineeurope.com
pec cardionlineeurope@pec.it



AZIENDA ASSOCIATA



AZIENDA CERTIFICATA



**HOLTER CARDIACO
(O DINAMICO DELLE 24/48 ORE)**

CARDIOLINE MONTAGNA STEFANO (03091960)

Servizio di refertazione Holter Cardiaco
 Cardio On Line Europe S.r.l.
 Via Principe Amedeo, 25 - Bari
 www.cardioonlineurope.com

Paziente

ID: _____ Nome: _____
 Data di nascita: 03/09/1960 58A Sesso: Maschio
 Telefono: _____ Email: _____

Esame holter

Inizio registrazione: 24/07/2019 16:25:13 Lunghezza: 1G 23h 59' 53"
 Apparecchiatura: Clickholter (NG) Cavo: 5 cavi

Anamnesi: _____
 Terapia: _____

Totale battiti: 222016
 Battiti normali: 221960 (99%)
 Battiti ventricolari: 6 (0%)

Conclusioni

RITMO SINUSALE COSTANTE CON FREQUENZA CARDIACA COMPRESA FRA V43 BPM E 123 (media 77)
 5 EXTRASISTOLI VENTRICOLARI, NON RIPETITIVE
 22 EXTRASISTOLI SOPRAVENTRICOLARI CON DUE SALVE DI 6 E 8 BATTITI (FC al picco 135)
 ASSENZA DI MODIFICAZIONI TRANSITORIE DEL TRATTO ST-T DI TIPO ISCHEMICO.
 FREQUENTI PAUSE SINUSALI NOTTURNE (max: 3210 msec).

Normalità: Non definito

Esaminato da:
 Dottor Giuliano V. Ciociola OMCeO-BA-1973-005789 Cardiologo refertante ID_089, Telecardiologia Ca
 Copia conforme all'originale in mio possesso (art. 19 DPR 445/2000)

Pag. 1

Tabella MONTAGNA STEFANO (03091960)

RR min	RR medio	RR max	FC min	FC max	AFIB	Aritmiato
536	701	880	68	111	00:00:00	00:00:02
580	752	948	63	103	00:00:00	00:00:00
552	786	920	65	108	00:00:00	00:00:00
644	877	1004	59	93	00:00:00	00:00:00
656	1000	1212	49	91	00:00:00	00:00:00
656	1012	1148	52	91	00:00:00	00:00:00
656	983	1116	53	91	00:00:00	00:00:00
488	768	1056	56	122	00:00:00	00:00:00
488	638	760	78	122	00:00:00	00:00:00
544	693	844	71	110	00:00:00	00:00:03
540	717	880	68	111	00:00:00	00:00:00
516	700	880	68	116	00:00:00	00:00:02
484	675	868	69	123	00:00:00	00:00:00
572	738	908	66	104	00:00:00	00:00:00
596	762	912	65	100	00:00:00	00:00:00
608	835	1000	60	98	00:00:00	00:00:00
656	911	1044	57	91	00:00:00	00:00:00
620	1003	1372	43	96	00:00:00	00:00:00
504	972	1264	43	99	00:00:00	00:00:00
572	728	880	68	104	00:00:00	00:00:00
500	680	844	71	120	00:00:00	00:00:00
540	712	884	67	111	00:00:00	00:00:00
488	659	856	70	122	00:00:00	00:00:00
504	701	900	66	119	00:00:00	00:00:04

SRA	DEL	PAU	SVEB	SVS	VEB
0	0	0	1	0	0
18:25 - 20:25	0	0	0	0	0
20:25 - 22:25	0	1	0	2	1
22:25 - 00:25	0	0	0	2	0
00:25 - 02:25	0	0	0	3	0
02:25 - 04:25	0	0	0	1	0

Pag. 4



Pag. 7

Il referto dell'Holter cardiaco riporta nell'ambito del risultato finale tutte le caratteristiche del monitoraggio diurno e notturno dell'attività cardiovascolare. Le pagine che compongono il referto includono tabelle riassuntive di tutti gli eventi aritmici, trend del tratto ST, frequenza minima, massima e media del ritmo cardiaco e strip degli eventi più significativamente importanti, classificati patologici dal cardiologo refertante. Il referto è redatto seguendo le linee guida diagnostiche internazionali, riportandone - più specificatamente - anche i valori unitari. Lo specialista che firma il referto se ne assume ogni responsabilità medico legale.





ardio On Line Europe
specialisti in telemedicina

Walk200b

rev. 01/08/2019

registratore della pressione arteriosa
by CARDIOLINE

SPECIFICHE TECNICHE

INTERVALLO DI VALORI PRESSIONE SISTOLICA DA 60 A 290 mmHg

INTERVALLO DI VALORI PRESSIONE DIASTOLICA DA 30 A 195 mmHg

INTERVALLO DI MISURAZIONE 0,1,2,4,5,6,12 OPPURE 30 MISURAZIONI ALL'ORA

INTERVALLO DI PRESSIONE STATICA DA 0 A 30 mmHg

TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO DA +10°C +40°C

UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO DA 15% A 90%

METODO DI MISURAZIONE OSCILLOMETRICO

INTERVALLO DI MISURAZIONE 0,1,2,4,5,6,12 OPPURE 30 MISURAZIONI ALL'ORA

PROTOCOLLO DI MISURAZIONE 2 GRUPPI DI INTERVALLO MODIFICABILI

ACCURATEZZA ± 3 mmHg, NELLA MISURA DEL DISPLAY

PESO 240 GR (BATTERIE INCLUSE)

DIMENSIONI 128x75x30 mm

ALIMENTAZIONE 2 AA NI-MH DA 1,2 V MIN 1500 MAH (AA) O 2 AA 1,5 V

INTERFACCE VERSO PC BLUETOOTH (CLASSE 1/100 M)



DESCRIZIONE

WALK200B È UN MISURATORE AMBULATORIALE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (MAP-ABPM) NELLE 24 ORE. SEMPLICE DA USARE, LEGGERO E COMPATTO PER MASSIMIZZARE IL COMFORT DEL PAZIENTE. DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DEI VALORI MISURATI E DEI MESSAGGI DI SERVIZIO, FUNZIONALITÀ DISABILITABILE VIA SOFTWARE; CONNETTIVITÀ EVOLUTA VERSO IL PC BASATA SU TECNOLOGIA BLUETOOTH STANDARD; ALGORITMO AUTO ADATTANTE PER IL CONTROLLO DEL GONFIAGGIO DEL BRACCIALE FUNZIONE DI EVENT MARKER E DI INIZIO/FINE PERIODI DI VEGLIA E SONNO; DIMENSIONI CONTENUTE E SILENZIOSITÀ DELLA POMPA. INDICAZIONI SIIA (SOCIETÀ ITALIANA IPERTENSIONE ARTERIOSA) IN CUI L'ABPM PUÒ ESSERE UTILE: IPERTENSIONE BORDER LINE, SOSPETTA IPERTENSIONE DA CAMICE BIANCO O MASCHERATA, IPERTENSIONE NOTTURNA, AMPIA VARIABILITÀ DELLA PA SIA A BREVE CHE A LUNGO TERMINE, DIABETE, ANZIANI, IPERTENSIONE EPISODICA O IPOTENSIONE (SINTOMATICA), GRAVIDANZA, VALUTAZIONE DI FARMACI, RESISTENZA AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, SOSPETTA APNEA DURANTE IL SONNO, DISCREPANZA TRA VALORI MISURATI IN FARMACIA/AMBULATORIO E AL DOMICILIO.



TENSIOMETRO ELETTRONICO

AUTOMATICO

UTILIZZATO PER PAZIENTI ANZIANI,
OBESI E CON ARITMIA



PC LINK

TRASMISSIONE DEI DATI DI
MISURAZIONE AL PC TRAMITE
CONNESSIONE BLUETOOTH



CENTRALE OPERATIVA

ESAMI, CON CONCLUSIONI
DIAGNOSTICHE, REFERATI
ESCLUSIVAMENTE DA CARDIOLOGI



CONDIVISIONE DEL REFERTO

SU AREE WEB RISERVATE
UNICAMENTE
DEDICATE AL CLIENTE



REFERATAZIONE CARDIOLOGICA

ENTRO **45'** DALLA RICEZIONE,
TUTTI I GIORNI DELL'ANNO
SUPERFESTIVI COMPRESI

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI A QUESTO DEVICE, SONO OFFERTE UNICAMENTE DA CARDIO ON LINE EUROPE

CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.

sede Via Principe Amedeo, 25 - 70121 Bari (BA)
tel. 080 5613578 | Cap. Soc. 100.000,00 € i.v.
Part. IVA n. 04871010726 | C.C.I.A.A. Bari n. 290463/96
mail info@cardioonlineeurope.com
pec cardioonlineeurope@pec.it




AZIENDA ASSOCIATA




AZIENDA CERTIFICATA




CARDIOLINE			
Dati paziente			
ID	Data di nascita	10/08/1971	Altezza
Cognome	Età	47 età	Peso
Nome	Sexo	Maschio	Indice massa corporea
Secondo nome	Dipper	No (Auto)	Circonferenza toracica
Dati esame			
Data esame	26/07/2019	Indicazioni	
Durata esame	23 ore 8 minuti	Terapia	TERAPIA PER IPERTENSIONE: erlolam e dilatend
Dati esame estesi			
Misure totali #	74	Va a dormire alle	01:30
Misure valide #	71 (96%)	Risveglio alle	07:45
Day	58 (95%)	Braccio	Braccio sinistro
Night	13 (100%)	Bracciale	Bracciale medio
			Pre esame
			PAS
			PAD
			FC

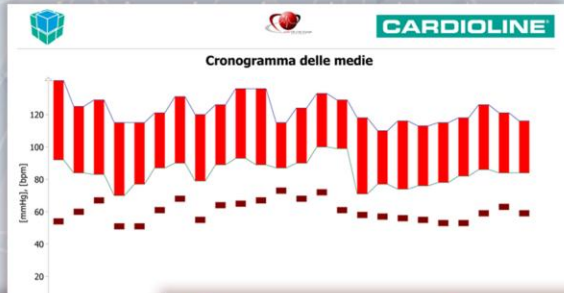

CARDIOLINE			
Analisi statistica			
Analisi globale			
	PAS	PAD	PAM
Min	107	67	82
Max	148	104	114
Media	123	84	97
Mediana	121	84	96
Deviazione stanc.	9	8	8
Soglie	/	/	/
%>Soglie	65	37	71
% Day/Night	6	8	7

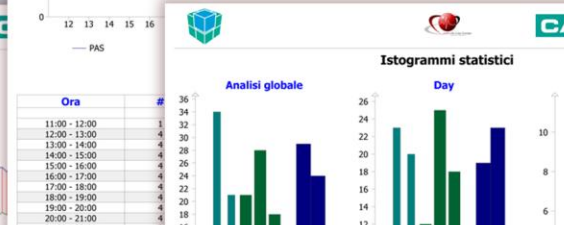

Conclusioni
Sporadico riscontro diurno valori pressori sisto-diastolici di tipo P.A. max diurna 148/102 mmHg, P.A. media diurna 124/85 mmHg, P.A. max notturna 116/78 mmHg.
Profilo non dipping. Cronotropismo non conservato.
Dr. F. Siena

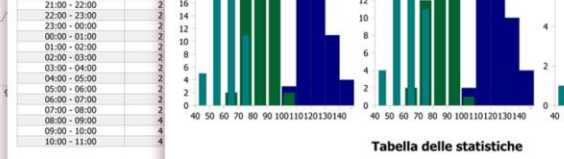

CARDIOLINE			
Tabella delle misure			
Ora	PAS	PAD	PAM
mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
11:37	141	92	108
11:48			
12:00	124	83	97
12:15	129	84	99
12:30	126	88	101
12:45	122	79	93
13:00	138	89	105
13:15	127	77	94
13:30	130	87	101
13:45	119	79	92
14:00	124	74	91
14:15	115	67	83
14:30	110	72	85
14:45	111	68	82
15:00	117	82	94
15:15	111	77	88
15:30	113	71	85
15:45	117	78	91
16:00	119	83	95
16:15	118	81	93
16:30	121	90	100
16:45	124	92	103
17:00	121	88	99
17:15	136	90	105
17:30	137	92	107
17:45	130	90	103
18:00	120	75	90
18:15	117	84	95
18:30	123	80	94
18:45	118	77	91
19:00	123	85	98

CARDIOLINE			
Tabella delle statistiche			
Analisi globale			
PAS	PAD	PAM	DIF
Min	107	67	82
Max	148	104	114
Media	123	84	97
Mediana	121	84	96
Deviazione stanc.	9	8	8
Soglie	/	/	/
%>Soglie	65	37	71
% Day/Night	6	8	7

Il referto dell'Holter pressorio riporta nell'ambito del risultato finale i principali parametri di valutazione quali valori minimi, massimi e medi della pressione, picchi transitori, carico pressorio, variabilità, pressione differenziale e frequenza del ritmo cardiaco. L'interpretazione **non è affidata** ad un algoritmo bensì ad uno specialista che, firmando il referto, se ne assume ogni responsabilità medico legale. I dati rilevati, inoltre, consentono al cardiologo di "macro categorizzare" il referto specificando, nel risultato finale, la normalità dell'esame, la anomalia (indicando la gravità) o, nei casi più acuti, la necessità di un rapido approfondimento in ambiente specialistico o ospedaliero, a beneficio di chiunque debba poi interpretare il referto.





MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI


Con il presente modello si richiedono informazioni relative alla TDS. Sarà nostra cura ricontattarla.


RAGIONE SOCIALE			TITOLARE		
INDIRIZZO				CAP	
CITTA'		PROV.	TEL.	CELL.	
MAIL			PEC		
C.F. / PARTITA IVA		IBAN		SDI	

Apporre una o più **X** per selezionare i prodotti/servizi a cui si è interessati ed inviare a info@cardionlineeurope.com

CARDIOLINE TOUCHECG HD+ ELETTROCARDIOGRAFO DIGITALE A 12 DERIVAZIONI STANDARD		PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI			ELETTRODI E MATERIALI DI CONSUMO CENTRALE OPERATIVA H24, 7/7 REFERTAZIONE ENTRO 15 MINUTI CONSULENZA CARDIOLOGICA "ON LINE" SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE HELP-DESK 1° LIVELLO H24, 7/7 TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD RILASCIO ATTESTATI PARTECIPAZIONE GDPR COMPLIANCE
		ACQUISTO UNICA SOLUZIONE <input type="checkbox"/>	LOCAZIONE (36 MESI) <input type="checkbox"/>	LEASING (36 MESI) <input type="checkbox"/>	

CARDIOLINE CLICKHOLTER HOLTER CARDIACO A 3 DERIVAZIONI		PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI			ELETTRODI E MATERIALI DI CONSUMO CENTRALE DI REFERTAZIONE DEDICATA PROCESSI OPERATIVI CERTIFICATI ISO REFERTO ENTRO 24, MAX 48 ORE SERVIZIO ALLERTA REFERTI PATOLOGICI SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE UPGRADE SOFTWARE E FIRMWARE TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD GDPR COMPLIANCE
		ACQUISTO UNICA SOLUZIONE <input type="checkbox"/>	LOCAZIONE (36 MESI) <input type="checkbox"/>	LEASING (36 MESI) <input type="checkbox"/>	

CARDIOLINE WALK200b HOLTER PRESSORIO		PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI			BRACCIALE PAZIENTE (26-32 CM) CENTRALE DI REFERTAZIONE DEDICATA PROCESSI OPERATIVI CERTIFICATI ISO REFERTO ENTRO 45 MINUTI, H12, 7/7 INVIO CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE SERVIZIO ALLERTA REFERTI PATOLOGICI SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD GDPR COMPLIANCE
		ACQUISTO UNICA SOLUZIONE <input type="checkbox"/>	LOCAZIONE (36 MESI) <input type="checkbox"/>	LEASING (36 MESI) <input type="checkbox"/>	

CARDIOLINE WALK400h HOLTER CARDIACO A 12 DERIVAZIONI		PRODOTTI E SERVIZI INCLUSI			ELETTRODI E MATERIALI DI CONSUMO CENTRALE DI REFERTAZIONE DEDICATA PROCESSI OPERATIVI CERTIFICATI ISO REFERTO ENTRO 24, MAX 48 ORE SERVIZIO ALLERTA REFERTI PATOLOGICI SU RICHIESTA, RISULTATI IN LINGUA INGLESE UPGRADE SOFTWARE E FIRMWARE TRAINING E TUTORAGGIO IN FAD GDPR COMPLIANCE
		ACQUISTO UNICA SOLUZIONE <input type="checkbox"/>	LOCAZIONE (36 MESI) <input type="checkbox"/>	LEASING (36 MESI) <input type="checkbox"/>	

NOTE	
-------------	--

